

nebzmart

ALÍVIO NA PALMA DA MÃO


glenmark

Nebulizador portátil de rede vibratória ativa

Manual do usuário **Modelo MBPN002**



Veja aqui um vídeo com o passo-a-passo da limpeza de seu Nebzmart.

Basta focar a imagem abaixo em seu leitor de QR Code:



Caro cliente,

Agradecemos pela compra de **Nebzmart**, o aparelho nebulizador projetado para oferecer conveniência, eficiência e portabilidade na terapia respiratória.

O seu **Nebzmart** usa a avançada tecnologia de rede vibratória ativa para fornecer cuidados com nebulização. Pode ser usado inclusive por pacientes pediátricos e adultos.

As advertências descritas neste manual alertam sobre circunstâncias que podem resultar em lesão ao paciente, ao usuário ou dano ao equipamento e estão sinalizadas com o símbolo: ⚠

⚠ Antes da utilização do Nebzmart, leia e entenda todo o manual de instruções e suas advertências.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Glenmark pelo telefone **0800 773 0130** ou pelo e-mail: **sac@glenmarkpharma.com**
Preencha os dados abaixo:

Preencha à mão as informações abaixo para consultas futuras	
• Número de série do nebulizador (“SN”, localizado na etiqueta afixada na face posterior da Unidade Principal).	
• Número do lote (localizado na lateral da caixa, logo abaixo da etiqueta de segurança).	
Data da compra do Nebzmart	
Local de compra do Nebzmart	

Dobre, grampeie ou cole aqui a **nota fiscal de compra do Nebzmart**. Se possível, tire uma foto e guarde a imagem junto aos seus arquivos, para o caso da tinta da nota fiscal se apagar com o tempo e perder a leitura da informação.

Índice

Introdução.....	4
Informações gerais.....	4
Conheça seu kit.....	8
Nome e função das partes.....	9
Como inserir ou substituir as pilhas.....	10
Como utilizar o adaptador de tomada.....	10
Como montar o Nebzmart.....	11
Adicionando o produto a ser nebulizado.....	11
Como usar o Nebzmart.....	12
Como desmontar o Nebzmart.....	13
Como limpar e desinfetar o Nebzmart após cada inalação.....	13
Desinfecção após o uso.....	14
Limpeza da Unidade Principal.....	15
Como transportar e armazenar o Nebzmart.....	15
Precauções de segurança.....	16
Cuidados.....	16
Alertas.....	17
Identificação e resolução de problemas.....	18
Especificações.....	20
Classificação e explicação dos símbolos.....	21
Certificado de garantia do nebulizador portátil.....	22

Introdução

Nebzmart é um aparelho nebulizador projetado para oferecer conveniência e eficiência na terapia respiratória.

Informações gerais

Propósito Médico	Este produto é projetado para nebulizar soluções e suspensões (desde solução fisiológica até medicamentos) em aerossóis com a finalidade de auxiliar nas terapias inalatórias. Não deve ser utilizado para nenhum outro propósito.
Usuários pretendidos	<p>Profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas ou pacientes sob a orientação médica.</p> <p>O usuário deve ser capaz de compreender o funcionamento geral deste produto e o conteúdo do manual de instruções.</p> <p>Este produto é projetado para pacientes de todas as idades, exceto para pacientes que estejam inconscientes, não respirando espontaneamente ou que apresentem condição médica que contraindique o uso do produto.</p> <p>⚠ Supervisione atentamente quando este produto for usado em bebês, crianças, idosos ou indivíduos com necessidades especiais. Uma supervisão apropriada é necessária quando este aparelho for utilizado por, ou perto de crianças ou pessoas incapacitadas. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas em estado de sonolência sem supervisão apropriada, para evitar a operação incorreta e riscos ao usuário.</p> <p>⚠ O produto pode conter peças pequenas que podem ser ingeridas acidentalmente.</p> <p>⚠ Este produto é aprovado apenas para uso em humanos, verificadas as condições acima.</p>

Ambiente de operação recomendado	Este produto foi projetado para ser utilizado em instalações médicas, como hospitais, clínicas e consultórios e também em ambiente domiciliar.
Vida útil contada a partir do uso, se seguidas as instruções de operação e conservação.	<p>Vida útil estimada: 2 anos para a Unidade Principal e 6 meses para o Copo de Medicação.</p> <p>A vida útil pode variar, dependendo das condições de uso, cuidados e armazenamento do produto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚠ Não lave, não apoie nem submerja a Unidade Principal em nenhum líquido. ⚠ Não limpe a Unidade Principal com substâncias abrasivas, objetos perfurocortantes ou qualquer tipo de produto químico. ⚠ Não submeta a Unidade Principal ou qualquer um dos componentes a fortes impactos, como uma queda. ⚠ Não desmonte as unidades nem tente reparar o produto ou seus componentes. ⚠ Alterações ou modificações no produto em desacordo com o manual de instruções provocarão a anulação da garantia do usuário.
Prazo de validade	Indeterminado.
Uso de pilhas	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ O produto comporta duas pilhas no formato AA. Use sempre pilhas de boa procedência. ⚠ Não use pilhas antigas e novas juntas nem misture pilhas de tipos diferentes. ⚠ O produto não funciona como carregador de pilhas recarregáveis ⚠ O produto não possui bateria em seu interior, não sendo recarregável. ⚠ Remova as pilhas preferencialmente após cada uso ou se for guardar o produto por longos períodos.

<p>Uso de cabo USB (cabo de energia)</p> <p> O cabo USB não recarrega as pilhas.</p> <p> Remova as pilhas antes de usar o cabo USB.</p>	<p> O cabo USB pode ser conectado a qualquer entrada USB que forneça 5V de energia.</p> <p> O adaptador para conexão do cabo USB à tomada de energia não acompanha o produto.</p> <p> Caso queira ligar o aparelho à rede elétrica, utilize um adaptador adequado, de preferência bivolt.</p> <p> Retire o adaptador da tomada após utilizar o produto.</p> <p> Utilize adaptador seguindo especificação CC 5 V / 1 A.</p> <p> Utilize somente adaptador que siga o padrão oficial de tomadas (IEC 60601-1:2005).</p>
<p>Temperatura e umidade de armazenamento e utilização</p>	<p>Temperatura e umidade de utilização: 10°C a 40°C e 30% a 85% UR (umidade relativa).</p> <p>Temperatura e umidade de armazenamento: -20°C a 70°C e 20% a 70% UR (umidade relativa).</p> <p> Não use nem armazene o produto em locais cuja umidade não esteja dentro dos parâmetros acima indicados.</p> <p> Não exponha o produto e/ou peças a temperaturas extremas (maiores que as acima indicadas), tais como luz solar direta.</p>
<p>Risco de contaminação biológica</p>	<p> Não compartilhe seu nebulizador com outras pessoas. Ele deve ser utilizado por um único usuário. Recomenda-se seguir os procedimentos de limpeza e desinfecção mencionados neste manual.</p>
<p>Risco de choque elétrico</p>	<p> Quando utilizar produtos elétricos, siga sempre as precauções básicas de segurança elétrica.</p> <p> Nunca utilize o produto quando estiver em banheiras, piscinas ou em superfícies úmidas/molhadas.</p> <p> Não use a Unidade Principal ou o cabo de energia se os mesmos estiverem molhados.</p> <p> Não manuseie o adaptador de energia com as mãos molhadas.</p> <p> Antes da limpeza certifique-se de que o produto esteja desligado e retire as pilhas ou cabo de energia do equipamento da tomada.</p> <p> Não mergulhe a Unidade Principal em água ou em qualquer outro líquido nem apoie a mesma em superfícies úmidas/molhadas.</p>

	<p> Desconecte o adaptador de energia da tomada nas seguintes circunstâncias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - caso ocorra qualquer mau funcionamento durante a operação; - imediatamente após o uso; <p> O produto não deve ser operado e o adaptador de energia deve ser desconectado da tomada imediatamente se o adaptador de energia estiver danificado ou se houver suspeita de falha.</p> <p> Não desconecte o adaptador de energia da tomada pelo cabo.</p> <p> Não inicie o nebulizador sem preencher o copo de medicação.</p>
<p>Recomendação de substituição de componentes</p>	<p> Recomenda-se a substituição do Copo de Medicação no mínimo a cada 6 meses, dependendo das condições de uso, cuidados e armazenamento.</p> <p> Substituir a máscara e o bocal a cada 2 anos dependendo das condições de uso, cuidados e armazenamento.</p>
<p>Uso de peças originais</p>	<p> Use apenas peças originais do Nebzmart. Peças não aprovadas para uso com o produto podem causar danos ao produto, aos usuários e pacientes.</p>
<p>Descarte</p>	<p> O descarte do produto, dos componentes e pilhas deve ser feito de acordo com as regulamentações locais aplicáveis.</p> <p> O descarte incorreto pode causar poluição ambiental.</p>
<p>Risco de queimadura durante a desinfecção</p>	<p> Realize o processo de desinfecção em local seguro, longe do acesso de crianças, pois pode haver risco de queimaduras com a água fervente.</p> <p> Utilize recipiente resistente ao calor para efetuar a desinfecção.</p>

Antes do uso	⚠ Lave a máscara ou o bocal de inalação com detergente neutro em água corrente e limpe e desinfete o Copo de Medicação antes de usar o produto pela primeira vez ou se o produto ficar muito tempo sem ser utilizado.
Depois do uso	⚠ Sempre lave a máscara ou o bocal de inalação e limpe e desinfete o Copo de Medicação.

Conheça seu kit

Verifique antes do uso

Os itens abaixo estão contidos na embalagem. Verifique se todas as partes estão íntegras, sem nenhum dano visível.

Em caso de partes faltantes, mau funcionamento ou dano, entre em contato com a loja onde você adquiriu o **Nebzmart** ou com o nosso SAC através do 0800 773 0130.



1. Unidade Principal



2. Copo de Medicação



3. Bocal para Inalação



4. Máscara para Adulto



5. Máscara Infantil



6. Cabo USB (cabo de energia)



7. Manual do Usuário



8. Guia de referência rápida

PEÇAS DE REPOSIÇÃO


ITEM	MODELO
Máscara para Criança	MBPN00204
Máscara para Adulto	MBPN00203
Bocal para Inalação	MBPN00207
Copo de Medicação	MBPN00201

⚠ O uso de peças diferentes daquelas especificadas acima podem resultar em funcionamento inadequado ou causar dano ao produto, aos usuários e pacientes.


⚠ Não acompanha adaptador de tomada.

Nome e função das partes

1. Unidade Principal

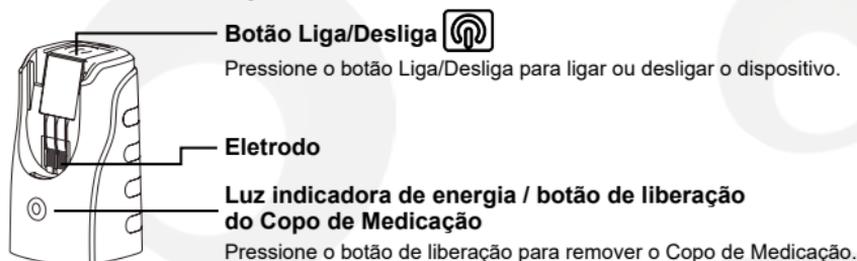

2. Copo de Medicação

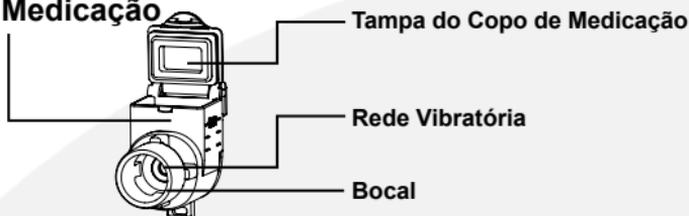

Tampa com vedação para evitar vazamentos.

INDICAÇÃO DAS LUZES





Lâmpada ligada

- Luz verde acesa ininterruptamente: funcionamento normal
- Luz laranja acesa ininterruptamente: alerta de baixa energia
- Luz laranja piscando: funcionamento anormal

Visualização inferior da Unidade Principal

Tampa do compartimento de pilhas com indicação em relevo dos polos: positivo (+) / negativo (-)

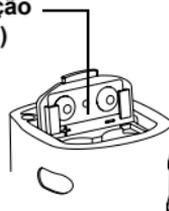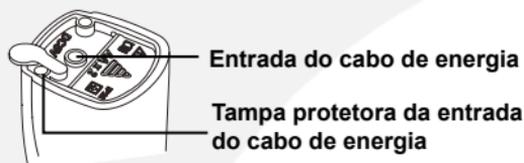

Como inserir ou substituir as pilhas

Este produto pode operar com duas pilhas alcalinas AA ou duas pilhas recarregáveis AA de níquel metal hidreto (Ni-MH).



1. Inserindo as pilhas:

- Vire a Unidade Principal de cabeça para baixo.
- Empurre para trás e puxe a tampa do compartimento de pilhas para abri-la.
- Insira duas pilhas AA alcalinas ou Ni-MH recarregáveis de acordo com a polaridade da pilha indicada dentro do compartimento de pilhas.
- Pressione e empurre a tampa do compartimento de pilhas para frente a fim de travá-la.

⚠ ADVERTÊNCIA:

NÃO insira as pilhas com os polos positivo (+) e negativo (-) invertidos, pois caso isso ocorra, o produto não funcionará. NÃO use pilhas antigas e novas juntas ou misture pilhas de tipos diferentes.

Remova as pilhas se for guardar o dispositivo por período prolongado. Prefira sempre utilizar pilhas de marcas conhecidas de boa procedência.

Como utilizar o adaptador de tomada

⚠ ADVERTÊNCIA:


Ao utilizar um adaptador de tomada, o equipamento utilizará esta fonte de energia como prioritária. Remova as pilhas antes de usar o cabo USB. Prefira utilizar um adaptador de tomadas adequado (IEC60601-1) e bivolt.



Abra a tampinha protetora situada na parte inferior do dispositivo.




Insira o cabo de energia (conector 3.5 x 1.35 x 9.5 mm) na Unidade Principal

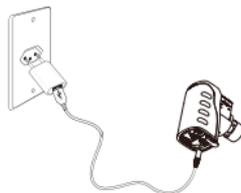

Insira a parte USB do cabo no adaptador e conecte-o em uma tomada padrão.

Como montar o Nebzmart

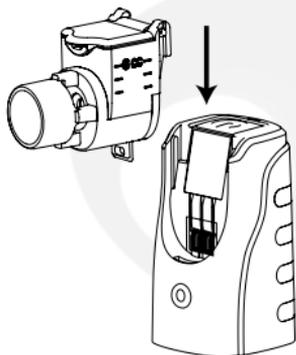

- Alinhe a parte de trás do Copo de Medicação com a parte da frente da Unidade Principal para encaixá-lo corretamente.
- Encaixe fazendo um movimento de deslizamento de cima para baixo.

• As duas peças precisam estar bem alinhadas para o encaixe adequado.



Adicionando o produto a ser nebulizado.



Abra a tampa do Copo de Medicação.



Insira o líquido a ser nebulizado no Copo de Medicação, na quantidade que lhe foi recomendada. **NÃO EXCEDA O LIMITE** (máx. 6 ml).



Feche a tampa do Copo de Medicação adequadamente.

Como usar o Nebzmart



- Conecte a máscara ou bocal de inalação ao dispositivo tomando cuidado para não obstruir as aberturas de ventilação, no caso das máscaras.
- Ligue o Nebzmart pressionando o botão Liga/Desliga e posicione a máscara sobre a boca e o nariz.
- Inspire e expire normalmente até que a nebulização termine.
- Se estiver usando o bocal para inalação, coloque-o entre os dentes, com os lábios selados em torno do bocal, e inspire pela boca, expirando pelo nariz.
- Ao finalizar a inalação, pressione o botão Liga/Desliga na parte superior do dispositivo, para desligá-lo.
- Remova as pilhas da Unidade Principal se for guardar o produto por período prolongado.

Botão
Liga/Desliga



⚠ ADVERTÊNCIA:

Quando a solução estiver quase esgotada, incline o dispositivo levemente para a frente, para garantir que o volume residual entre em contato com a rede vibratória e seja completamente nebulizado. Soluções de alta viscosidade podem resultar em baixa nebulização ou entupimento da malha vibratória. Nesse caso, desligue a energia e remova a solução acumulada na malha vibratória com gaze ou toalha sem fiapos.

Óleos essenciais não devem ser utilizados neste produto.


Se houver acúmulo excessivo de solução na rede vibratória, a nebulização pode parar. Neste caso, desligue o dispositivo e faça o processo de desinfecção.

A taxa e o tempo de nebulização são variáveis e irão depender de vários fatores, tais como:

- Do volume e da viscosidade do líquido a ser nebulizado;
- Do estado de higienização da malha vibratória.

ASSIM, É DE CRUCIAL IMPORTÂNCIA A HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO APÓS CADA NEBULIZAÇÃO.

Como desmontar o Nebzmart

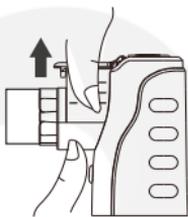

- Aperte levemente o botão para liberar o Copo de Medicação.
- Puxe-o para cima.

Como limpar e desinfetar o Nebzmart após cada inalação

PARA QUE O APARELHO FUNCIONE DE MODO ADEQUADO, É IMPORTANTE QUE O PROCESSO DE LIMPEZA SEJA FEITO APÓS CADA USO DO MESMO.



RISCO BIOLÓGICO:

Não compartilhe seu nebulizador com outras pessoas. Ele deve ser utilizado por um único usuário. Pode haver risco de contaminação biológica caso o produto seja utilizado por mais de um paciente.

Limpeza após cada inalação

Após cada inalação, proceda da seguinte forma:

1 - Limpeza da máscara ou bocal:

- Remova a máscara ou bocal do produto e faça o procedimento de limpeza.
- Lave e enxague a máscara ou o bocal de inalação com detergente neutro em água corrente.

2 - Limpeza do Copo de Medicação:

- Remova o Copo de Medicação da Unidade Principal.
- Descarte as soluções residuais do Copo de Medicação, se houver.
- Encaixe o Copo de Medicação na Unidade Principal.
- Coloque um pouco de água filtrada no Copo de Medicação e ligue o aparelho para nebulizar por 1 a 2 minutos para limpar a rede.
- Retire as pilhas ou desconecte o cabo USB da Unidade Principal.
- Remova novamente o Copo de Medicação da Unidade Principal.
- Lave e enxague o copo de medicação com água filtrada.
- Elimine o excesso de água e deixe as peças secando ao ar sobre um papel-toalha ou toalha limpa e seca.
- Certifique-se de que todas as peças estejam limpas e completamente secas antes de guardá-las ou usá-las.

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:

NÃO mergulhe a Unidade Principal na água, nem a apoie, pois há risco de choque elétrico e danos no dispositivo.

Não toque na rede vibratória com as mãos ou qualquer outro objeto.

Sempre mantenha o compartimento de pilhas seco.

NÃO lavar na lava-louças.

NÃO utilizar o microondas para secar nenhuma das partes.

Desinfecção após o uso

ADVERTÊNCIA:

É importante desinfetar o Copo de Medicação (rede vibratória) com água fervente (imediatamente após desligar o fogo ou fonte de calor) após o uso, sempre que:

- Ocorrer a última nebulização do dia;
- Um medicamento for utilizado na nebulização;

Remova a máscara ou o bocal do dispositivo e faça o procedimento de limpeza conforme descrito anteriormente.

- Após ferver a água em um recipiente apropriado, desligue o fogo e mergulhe cuidadosamente somente o Copo de Medicação na água fervente por um período de 10 (dez) minutos, com sua tampa aberta.

( **NÃO COLOQUE O COPO DE MEDICAÇÃO DIRETAMENTE NO RECIPIENTE ENQUANTO O FOGO ESTIVER ACESO. LEMBRE-SE DE DESLIGAR O FOGÃO, OU FONTE DE CALOR, ANTES DE COLOCAR O COPO DE MEDICAÇÃO).**

- Remova, cuidadosamente, o Copo de Medicação da água fervente e retire o excesso de água.
- Aguarde o Copo de Medicação esfriar e deixe-o secar naturalmente em cima de um papel-toalha ou toalha limpa e seca, mantendo-o fora do alcance das crianças.
- Certifique-se de que todas as peças estejam limpas e completamente secas antes de guardá-las ou usá-las.

RISCO DE QUEIMADURA

Há risco de queimadura na manipulação de água fervente, por isso realize o procedimento de desinfecção em local seguro, longe do acesso de crianças.

NÃO FERVA O COPO DE MEDICAÇÃO DIRETAMENTE, OU SEJA, A FONTE DE CALOR DEVE ESTAR DESLIGADA.

NÃO enxágue, apoie ou mergulhe a Unidade Principal em nenhum líquido.

⚠️ ADVERTÊNCIA:

Nunca coloque o Copo de Medicação no micro-ondas, autoclaves ou em esterilizadores de mamadeiras.

Limpeza da Unidade Principal

A Unidade Principal **NÃO** pode ser enxaguada, imersa em nenhum líquido ou apoiada em superfícies úmidas/molhadas.



Unidade Principal

Para a limpeza da Unidade Principal, onde se encontra o circuito elétrico, utilize apenas uma gaze levemente úmida e passe delicadamente no dispositivo, retirando as sujeiras. **JAMAIS USE ÁGUA CORRENTE.**

⚠️ ADVERTÊNCIA:

Nunca coloque a Unidade Principal, o Cabo USB ou o Adaptador de Energia imersos na água, no micro-ondas, autoclaves ou em esterilizadores de mamadeiras.

Como transportar e armazenar o Nebzsmart

Armazene seu Nebzsmart em um ambiente seco e limpo.

⚠️ ADVERTÊNCIA:

- **NÃO** armazene ou transporte o produto contendo líquido residual no Copo de Medicação.
- Remova as pilhas preferencialmente após cada uso ou se for guardar o produto por longos períodos. Caso contrário, poderá resultar em danos devido ao vazamento da pilha.
- **NÃO** deixe o aparelho exposto à luz solar direta, com umidade elevada, ambiente extremamente quente ou frio.
- Mantenha este produto longe do fogo, campos eletromagnéticos elevados, forno de micro-ondas e fora do alcance das crianças.

Precauções de segurança

LEIA TODOS OS ALERTAS E INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO.

Como acontece com qualquer produto médico, este produto pode ser danificado em caso de grandes oscilações na rede elétrica ou impacto mecânico.

Recomendamos que você tenha pilhas sobressalentes.

Quando utilizar produtos elétricos, siga sempre as precauções básicas de segurança.

Como acontece com qualquer dispositivo elétrico, o uso por crianças deve ter uma supervisão apropriada de adultos.

Cuidados

NÃO TENTE LIMPAR A REDE VIBRATÓRIA COM OBJETOS PONTIAGUDOS OU DE QUALQUER TIPO, POIS ISSO PODE DANIFICÁ-LA.

- ⚠ Evite deixar cair o dispositivo, caso contrário, ele poderá não funcionar normalmente.
- ⚠ Mantenha o dispositivo longe da luz solar direta, calor ou frio excessivos, para evitar danificar as pilhas.
- ⚠ Não tente abrir, consertar ou modificar este aparelho. Isso pode afetar seu funcionamento e conseqüentemente anulação de sua garantia.
- ⚠ Não deixe cair líquidos sobre a Unidade Principal. Caso isso ocorra, seque-o imediatamente.
- ⚠ Siga as leis locais e os planos de reciclagem relativos à eliminação ou reciclagem dos componentes, pilhas e embalagens.
- ⚠ Somente o Copo de Medicação deve ser limpo e desinfetado a cada uso. Não lave ou submerja a Unidade Principal em nenhum líquido, nem apoie a mesma sobre superfícies úmidas/molhadas.

⚠ ADVERTÊNCIA:

Não coloque o copo de medicação no micro-ondas, autoclaves ou mesmo em esterilizadores de mamadeiras.

Alertas

- ⚠ Utilize este produto apenas para nebulizar solução fisiológica ou medicamentos prescritos pelo seu médico.
- ⚠ Não utilize óleos essenciais neste produto.
- ⚠ Este nebulizador é destinado apenas para a terapia inalatória.
- ⚠ Qualquer outra aplicação deste produto é imprópria e perigosa.
- ⚠ O fabricante não se responsabiliza por nenhum dano causado por uso impróprio ou incorreto.
- ⚠ Não compartilhe seu nebulizador com outras pessoas. Ele deve ser utilizado por um único usuário.
- ⚠ Limpe todas as partes do seu nebulizador portátil antes e depois de cada utilização.
- ⚠ A supervisão de um adulto é necessária quando este produto for usado por crianças, idosos e indivíduos que necessitem de assistência especial.
- ⚠ Nunca opere este dispositivo se alguma das peças não estiver funcionando corretamente ou tiver sido danificada.
- ⚠ Certifique-se de que o dispositivo tenha sido devidamente limpo antes da utilização para evitar uma possível contaminação.
- ⚠ **Siga sempre as orientações do seu médico, principalmente quando for fazer a nebulização com um medicamento.**

Identificação e resolução de problemas

Caso ocorra algum problema enquanto você estiver utilizando o aparelho, verifique primeiramente a lista a seguir:

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	AÇÃO
Baixa nebulização.	Bateria fraca.	Substitua as pilhas ou utilize o cabo USB.
	As manchas no eletrodo causam uma conexão com falha.	Limpe os eletrodos suavemente com gaze umedecida com álcool e deixe secar.
	Os orifícios da rede vibratória estão entupidos.	Consulte o procedimento de limpeza e desinfecção para limpar o Copo de Medicação.
	A rede vibratória está quebrada/danificada.	Substitua o Copo de Medicação.
Não funciona mesmo que o interruptor de alimentação esteja ligado (o indicador de alimentação não acende e não há nebulização).	As pilhas estão inseridas na direção errada.	Siga as marcas (+) e (-) na tampa do compartimento de pilhas para reinseri-las na direção correta.
	As pilhas estão esgotadas.	Substitua as pilhas ou utilize o cabo USB.
	Conexão com falha entre o adaptador e a Unidade Principal.	Verifique e reconecte o adaptador à Unidade Principal.

Nenhuma nebulização mesmo se o interruptor de alimentação e o indicador estiverem acesos.	O Copo de Medicação não está encaixado corretamente.	Retire o Copo com cuidado e encaixe-o de acordo com as instruções.
	Os orifícios da rede vibratória estão entupidos.	Consulte o procedimento de limpeza e desinfecção para limpar o Copo de Medicação.
	A rede vibratória está quebrada/danificada.	Substitua o Copo de Medicação.
O indicador de alimentação mostra luz laranja contínua.	Pilhas fracas.	Substitua as pilhas ou utilize o cabo USB.
O indicador de alimentação mostra luz laranja e fica piscando.	Conexão com falha do eletrodo e a Unidade Principal.	Limpe os eletrodos suavemente com gaze umedecida com álcool e deixe secar. Reencaixe o Copo de Medicação.
	A rede vibratória está quebrada/danificada.	Substitua o Copo de Medicação.

⚠ ADVERTÊNCIA:

Se o dispositivo não nebulizar normalmente depois de realizados os procedimentos acima mencionados, entre em contato com o SAC da Glenmark pelo número 0800 773 0130 ou pelo e-mail sac@glenmarkpharma.com ou com a loja onde adquiriu o Nebzmart.

Nunca opere este dispositivo se alguma das peças não estiver funcionando corretamente ou tiver sido danificada.

Recomendamos que o Copo de Medicação seja substituído após aproximadamente seis meses de uso do produto.

Siga sempre os procedimentos de limpeza e desinfecção do aparelho para o adequado funcionamento do mesmo.

Especificações

PRODUTO	NEBZMART
Modelo	MBPN002
Método de operação	Tecnologia de rede vibratória ativa
Fonte de alimentação	2 Pilhas Alcalinas AA ou 2 Pilhas recarregáveis AA Ni-Mh ou Cabo USB (cabo de energia)
Especificação do adaptador de energia	CC 5 V / 1 A
Consumo de energia	< 1,5 W
Frequência vibratória	Aprox. 117 kHz +/- 15%
Taxa de nebulização	≥ 0,25 mL/min ⁽¹⁾
Tamanho da partícula MMAD	≤ 5 μ ⁽²⁾
Capacidade do Copo de Medicação	Aprox. 6 ml
Dimensão	Aprox. C 78 x L 41 x A 73 mm
Peso	Aprox. 74 g (excluindo as pilhas)
Temperatura de operação e umidade	Temperatura: 10 a 40°C Umidade relativa: 30 - 85% Pressão atmosférica: 800 - 1060 hPa ⁽³⁾
Condição de armazenagem e entrega	Temperatura: -20 a 70°C Umidade relativa: 20 - 75% Pressão atmosférica: 800 - 1060 hPa ⁽³⁾

(1) taxa de nebulização de acordo com dados fornecidos pelo fabricante.

(2) média do MMAD de acordo com dados fornecidos pelo fabricante.

(3) hPa = hectopascals

Classificação e Explicação dos Símbolos

	Advertência
	Risco de queimadura
	Risco de choque elétrico
	Risco de contaminação biológica
	Botão Liga/Desliga
	Fonte de alimentação CC (corrente contínua)
	Limites de temperatura de operação: 10 °C a 40 °C
	Limites de temperatura de armazenagem e fornecimento: -20 °C a 70 °C
	Limites de umidade de operação: umidade relativa de 30 a 85%
	Limites de umidade de armazenagem e fornecimento: umidade relativa de 20 a 75%
	Equipamento tipo BF de acordo com IEC60601-1
IP22	Protegido contra objetos estranhos iguais ou superiores a 12,5 mm de diâmetro e contra gotas de água que caem até 15° verticalmente
	Siga as instruções de uso
	Frágil
	Lote
	Fabricante

Certificado de garantia do nebulizador portátil

1. A Glenmark garante que:

(i) para a Unidade Principal do Nebzmart quanto a defeitos de fabricação e mão de obra, se utilizada de acordo com as instruções deste Manual, período de garantia de dois (2) anos contados da data da compra pelo usuário final, englobando neste prazo o período de garantia legal que corresponde aos primeiros noventa (90) dias contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto;

(ii) para o Copo de Medicação quanto a defeitos de fabricação e mão de obra, se utilizada de acordo com as instruções deste Manual, o período de garantia de seis (6) meses contados da data da compra pelo usuário final, englobando neste prazo o período de garantia legal que corresponde aos primeiros noventa (90) dias contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto;

1.1. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação. São elas: a Unidade Principal, as máscaras e bocal, o Copo de Medicação e o cabo USB.

1.2. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Consumidor deverá arcar com as custos relacionados à troca das partes, peças e componentes, além do custo da mão de obra de eventual reparo, se aplicável.

2. A garantia¹ não se aplica nos seguintes casos:

• Unidade Principal e Copo de Medicação

I - Uso em desacordo com as instruções escritas para o produto.

II - Danos causados por queda ou mau uso, que tenham o prazo de garantia expirado, ou que apresentem avarias causadas por incêndio, raios, enchentes e demais intercorrências climáticas e desgaste natural do produto.

Entende-se como mau uso: contato das peças com produtos químicos de qualquer natureza, seja acidental ou com propósito de limpeza; peças com furos, amassados ou qualquer outra alteração.

III - Não apresentação de Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de compra ou se estes apresentarem rasuras ou modificações.

IV - Reparos, adaptações ou modificações feitos aos dispositivo por pessoas não autorizadas pela Glenmark.

• Copo de Medicação

V - Entupimento ou obstrução da malha vibratória devido ao uso em desacordo com as instruções de uso para limpeza e desinfecção ou por uso de substância não recomendada.

¹ Válida apenas com a Nota Fiscal do produto.

3. Durante o período de garantia indicado nos itens (i) e (ii), 1, acima, a Glenmark substituirá o dispositivo ou produto com defeito. O dispositivo de substituição pode ser do mesmo modelo ou um modelo equiparado. A substituição do dispositivo não deve servir de base para prorrogação da garantia, sendo esta contada a partir da data de compra. Todos os dispositivos ou peças substituídas são de propriedade da Glenmark. Qualquer despesa que não seja de manutenção (incluindo, mas não limitando aos custos de envio e retorno ou despesas decorrentes de seu pedido específico) serão custeadas pelo consumidor.

4. Caso o serviço de garantia seja necessário, entre em contato com o revendedor mais próximo ou com a loja onde você comprou este produto ou com o SAC Glenmark pelo telefone 0800 773 0130 ou pelo e-mail: sac@glenmarkpharma.com.

5. Qualquer despesa que não seja de manutenção (incluindo, mas não se limitando a despesas de envio de ida e volta decorrentes de sua solicitação específica) serão arcadas pelo consumidor.

6. Este Certificado de Garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da GLENMARK FARMACEUTICA LTDA.

7. A garantia concedida por este Certificado fica limitada e as responsabilidades da Glenmark limitam-se às condições estabelecidas neste Certificado de Garantia. Sob hipótese alguma a Glenmark será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais em relação aos produtos e seus dispositivos. Na medida do permitido pela legislação aplicável, eventual indenização a ser paga pela GLENMARK por danos diretos ou indiretos causados ao consumidor se limitará ao valor pago pelo produto.

8. Entre em contato com a loja do revendedor onde você comprou este produto ou com o SAC Glenmark pelo telefone 0800 773 0130 ou pelo e-mail:

sac@glenmarkpharma.com.

Para informações adicionais, sugestões ou reclamações entre em contato com o SAC: 0800 773 0130. Ou pelo e-mail: sac@glenmarkpharma.com

Fabricado por MICROBASE TECHNOLOGY CORP. No 756, 758 Jiadong Rd., Bade District, Taoyuan City - Taiwan

Importado e distribuído por GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ 44.363.661/0005-80 Rua Edgar Marchiori, 255, Setor Glenmark Distrito Industrial, CEP: 13280-000, Vinhedo/SP - Brasil

Farmacêutica Responsável:

Gisele Castrillon - CRF/SP Nº 19.825

Registro ANVISA nº 80874820002

Fabricado em Taiwan

© 2020 Glenmark Farmacêutica

